



הוראות שימוש

אמ"ר מס': 11550401

אזהרה: בהתאם
לחוק הפדרלי של
ארה"ב, מוצר זה
חייב במרשם
רופא



SilverStream® היא תמיסת בופר היפרטונית, עם תכונות הידרוג'ל וריח נעים, לשמירת והוספת לחות וטיפול בפצעים. SilverStream® היא תמיסה צלולה, חסרת צבע, המוגנת מזיהום חיידקי על ידי ריכוז נמוך של יוני כסף. היא מסופקת בבקבוקים של 100 מ"ל, 250 מ"ל ו- 500 מ"ל.

שימוש יעודי והתוויות לשימוש:

SilverStream® מיועדת לשימוש תחת השגחה של מטפל רפואי מקצועי לטיפול ולחלוח של פצעים כמו פצעי לחץ בדרגות I-IV, כיבי עמדון (Stasis ulcers), כיבי סוכרת ברגלים, פצעים לאחר ניתוח, כוויות מדרגה ראשונה ושנייה, חתכים, שריטות וגירוי עור קלים.

הוראות שימוש כלליות:

SilverStream® מיועדת לטיפול ולחלוח על ידי מזיגה של תמיסת SilverStream® ישירות מהבקבוק - באמצעות מזרק פלסטי או במזרק כדור גומי, השפרצה על הפצע בעזרת בקבוק ספריי, השמה עם התקן המיועד לאפשר שטיפה או על ידי מזיגה על גזה / תחבושת או ספוג. שים / פעם אחת עד פעמיים מדי יום, לפי הוראות הרופא.

הערה: הפצע ניתן לניקוי אם SilverStream® יושם בעזרת מחט 19G (לחץ השמה של 10-19 psi).

אזהרות והתראות:

- לשימוש חיצוני בלבד. המנע ממגע עם העיניים.
- השתמש/י רק בבקבוק שלא ניזוק.
- אל תשתמש/י בחולים עם היסטוריה של רגישות יתר לאחד מהמרכיבים.
- הפסק/י השימוש אם מתפתח גירוי.
- הימנע/י משימוש בתמיסה עכורה או בעלת צבע.
- הגן/י על הבקבוק ממגע ישיר עם הפצע. בקבוקים שבאו במגע ישיר עם הפצע יש להשמיד לאחר השימוש.
- לשימוש בחולה אחד בלבד.
- אם הבקבוק נסגר מיד לאחר השימוש והפתח שלו מוגן מזיהום, ניתן להשתמש שימוש חוזר בתמיסה תוך 28 ימים מפתיחת הבקבוק לראשונה.
- אחסן את התמיסה בטמפ' בין 10-30 מעלות צלזיוס.
- בקבוק ריק ניתן לזרוק לפח האשפה. בקבוק שמכיל תמיסה חייב להיות מסולק לאתר המתאים.
- אל תשים/י יותר מ 700 מ"ל של תמיסת SilverStream® בתוך 24 שעות.

מרכיבים:

מים מטוהרים, גליצרול (גליצרין), סורביטן מונולאורט (טווין 20), טריס, מנתול וכסף ניטרטי 0.01% (w/v)

כל אריזה מכילה שניים עשר (12) בקבוקים של 250 מ"ל או 500 מ"ל או עשרים וארבעה (24) בקבוקים של 100 מ"ל ועלון הוראות שימוש המהווה חלק מתווית הבקבוק.

סמלים:

להלן תיאור הסמלים הגרפיים המופיעים על תוית SilverStream®:

זהירות	
היעזר/י בהוראות השימוש	
יצרן	
שמור/י את הבקבוקים הרחק מאור שמש ישיר	
מגבלת טמפרטורה	
השתמש/י לפני תאריך	
מעוקר על ידי שימוש בטכנולוגית מילוי אספטי	
אין לעקר שנית	
קוד אצווה/ מס' סחורה	

משרדי הנהלה ראשית
אנזיסרג' בע"מ
רחוב שבזי 26
ראש העין 4802126
טלפון: 03 622 7600
פקס: 03 622 7601
www.enzysurge.com